

溫度監視卡使用說明

■構造及用途

監視卡上黏貼之監視片有 A、B、C、D 共四格溫度指數監控窗格，用於監測疫苗運送及儲存過程中之暴露溫度與時間。

■效期

監控窗格下方鋼印第一數字為西元年，後三碼為該年第幾天製造，監視片有效期自該日期起兩年。



「9226」製造日為 2009 年第 226 天，至 2011 年 225 天屆效。

■填寫及使用說明（請參閱背面之說明）

監視卡正面	監視卡背面																																											
<p>廠商原片 A 格</p> <p>疫苗 儲存 溫度監視卡 運送</p> <table border="1"> <tr> <th>入庫日期</th> <th>溫度指數</th> <th>地點</th> <th>出庫日期</th> <th>溫度指數</th> </tr> <tr> <td>100.2.5</td> <td>—</td> <td>高雄市政府衛生局</td> <td>100.3.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>100.3.8</td> <td>—</td> <td>小港區衛生所</td> <td>100.5.5</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>100.5.5</td> <td>A 格</td> <td>林山兒科</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3M MonitorMark Dual T11 9861A 10°C(50°F), 2 weeks 34°C(93°F), ≤ 1 hour</p> <table border="1"> <tr> <th>如果 A 格全變藍</th> <th>如果 B 格全變藍</th> <th>如果 C 格全變藍</th> <th>如果 ABCD 格全變藍</th> </tr> <tr> <td>三個月內可以使用</td> <td>三個月內可以使用</td> <td>三個月內可以使用</td> <td>三個月內可以使用</td> </tr> </table> <p>口服小兒麻痺疫苗 麻疹、德國麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 白喉、百日咳、破傷風混合疫苗 - 十介苗 破傷風類毒素、白喉、破傷風混合疫苗</p> <p>供應廠商: Sanofi Pasteur 產品名稱: 五合一疫苗 發貨日期: 100.2.5</p>	入庫日期	溫度指數	地點	出庫日期	溫度指數	100.2.5	—	高雄市政府衛生局	100.3.8	—	100.3.8	—	小港區衛生所	100.5.5	—	100.5.5	A 格	林山兒科			如果 A 格全變藍	如果 B 格全變藍	如果 C 格全變藍	如果 ABCD 格全變藍	三個月內可以使用	三個月內可以使用	三個月內可以使用	三個月內可以使用	<p>溫度監視卡填寫及使用說明</p> <p>將溫度監視卡與疫苗放在一起</p> <p>▲當「收到疫苗」時，請在卡片上填寫：</p> <p>1. 入庫日期</p> <p>2. 溫度指數（—、A、B、C、D）</p> <p>① 所有格子仍維持不變色（白色），溫度指數請填「—」</p> <p>② A 格變藍色，其餘格不變色，溫度指數請填「A」</p> <p>③ A、B 格變藍色，其餘格不變色，溫度指數請填「B」</p> <p>④ A、B 和 C 格變藍色，其餘格不變色，溫度指數請填「C」</p> <p>⑤ A、B、C 和 D 格變藍色，溫度指數請填「D」</p> <p>▲地點</p> <p>▲當「發疫苗」時，請在卡片上填寫：</p> <p>1. 出庫日期</p> <p>2. 溫度指數（—、A、B、C、D）</p> <p>當所有格子仍維持不變色（白色），則此箱疫苗可正常使用</p> <p>如果 A、B、C 三格全變藍，但 D 不變色時，表示此箱疫苗曾暴露在超過 10°C 但不到 34°C 的環境下，其暴露時間如下：</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">溫度指數</th> <th colspan="3">溫度指數</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> <tr> <td>12°C</td> <td>3天</td> <td>8天</td> <td>14天</td> </tr> <tr> <td>21°C</td> <td>2天</td> <td>6天</td> <td>11天</td> </tr> </table> <p>如果 D 格變藍，表示此箱疫苗曾暴露在 34°C 以上的溫度下，至少 2 小時，請檢查冷凍冷藏系統何處有問題，並加以改善。</p> <p>當有效期限已到，則不適用三個月內可以使用的指示。</p> <p>☀ 當溫度 > 10°C 時由 A 格開始變藍，如果溫度降到 10°C 以下，則藍色停止擴散。如：A 格全藍，表示疫苗可能暴露於 12°C 3 天或 21°C 2 天。</p> <p>☀ 如果 D 格變藍，表示此冰箱疫苗曾暴露在 34°C 以上的溫度下，至少 2 小時，疫苗全數毀損不能使用，請立即通報衛生所處理，並檢查釐清冷運冷藏設備問題，以加以改善。</p>	溫度指數	溫度指數			A	B	C	12°C	3天	8天	14天	21°C	2天	6天	11天
入庫日期	溫度指數	地點	出庫日期	溫度指數																																								
100.2.5	—	高雄市政府衛生局	100.3.8	—																																								
100.3.8	—	小港區衛生所	100.5.5	—																																								
100.5.5	A 格	林山兒科																																										
如果 A 格全變藍	如果 B 格全變藍	如果 C 格全變藍	如果 ABCD 格全變藍																																									
三個月內可以使用	三個月內可以使用	三個月內可以使用	三個月內可以使用																																									
溫度指數	溫度指數																																											
	A	B	C																																									
12°C	3天	8天	14天																																									
21°C	2天	6天	11天																																									
<p>➤ 收到疫苗時，請在卡片填寫<u>入庫日期</u>、<u>入庫溫度指數</u>、<u>地點</u>。</p> <p>➤ 將監視卡與疫苗擺放在一起，並每日查看溫度指數變色情形。</p> <p>➤ 轉出疫苗時，請在卡片填寫<u>出庫日期</u>、<u>出庫溫度指數</u>。</p>																																												