

保溫箱使用方法

1. 保溫箱內溫度維持在 $32 \sim 34^{\circ}\text{C}$ ，溼度 $55 \sim 65\%$
2. 體重愈輕的早產兒需要較高的環境溫度
3. 在早產兒未抵達前先準備好保溫箱
4. 保溫箱應遠離窗戶和冷的外牆及空氣調節器，以防輻射散熱
5. 保溫箱使用時，如需調整眼罩，請利用兩側小窗口勿開門
6. 打開保溫箱時抱出嬰兒時應以毛毯保暖
7. 保溫箱每日以清水清潔(總消時亦用清水擦拭即可，不可用 Antiseptal 或其他有機溶劑，以免破壞箱蓋)
8. 維持 B a b y 背溫在 $36.5 \sim 37.5^{\circ}\text{C}$ 之間
9. 保溫箱請注意要關好，注意 B a b y 之安全